



CE 0482

## Desinfektionstücher

# DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion von empfindlichen Oberflächen

- streifenfreie Anwendung
- besonders materialschonend
- wirksam gegen Noro-Viren

### Präparatetyp

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES sind gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher zur materialschonenden Schnelldesinfektion von empfindlichen Oberflächen. DESCOSEPT SENSITIVE WIPES eignen sich besonders für die Reinigung und Desinfektion von Displays und empfindlichen Oberflächen. Die Kombination von Tuch und Tränkflüssigkeit ist optimal aufeinander abgestimmt, so dass eine schonende und wirksame Desinfektion ermöglicht wird. Die DESCOSEPT SENSITIVE WIPES lassen sich einzeln aus dem wiederverschließbaren und besonders anwenderfreundlichen Flowpack entnehmen.

### Anwendungsbereiche

**Gem. MPG:** Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nicht invasiven Medizinprodukten. Besonders geeignet für Displays, Tastaturen und Bedienfelder von empfindlichen medizinischen Geräten.

**Gem. Biozidprodukte-Verordnung:** Schnell-desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

### Wirkspektrum und Einwirkzeiten

| Wirkspektrum   |                                  | 30 Sek. | 1 Min. |
|--|----------------------------------|---------|--------|
| Flächendesinfektion<br>gem. DGHM/VAH<br>(bakterizid, levurozid)            | hohe Belastung                   |         | •*     |
|  | geringe Belastung                |         | •*     |
| wirksam gegen alle behüllten Viren<br>inkl. HBV/HIV/HCV (begrenzt viruzid) | gem. RKI/DVV                     | •       |        |
|  | Vaccinia-Virus                   | •       |        |
|  | BVDV                             | •       |        |
| Rota-Virus   | gem. EN 14476                    | •       |        |
| Noro-Virus (MNV)   | gem. EN 14476, geringe Belastung |         | •      |
| tuberkulozid (M. terrae)   | gem. EN 14348, geringe Belastung | •       |        |
| mykobakterizid (M. avium)  | gem. EN 14348, geringe Belastung |         | •      |

\* gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste

|   |   |   |
|---|---|---|
| Geeignet zur Verwendung in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko          | gem. VAH Empfehlung September 2014 zu Tuchspendersystemen | • |
| Geeignet zur Verwendung in Bereichen ohne oder mit möglichem Infektionsrisiko | gem. VAH Empfehlung September 2014 zu Tuchspendersystemen | • |

### Anwendung

Oberflächen mit DESCOSEPT SENSITIVE WIPES abwischen. Hierbei auf vollständige Benetzung achten und Einwirkzeit einhalten.



## Desinfektionstücher

# DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

### Wirkspektrum

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES wirken:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- levurozid (C. albicans)
- tuberkulozid
- mykobakterizid
- virusinaktivierend inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, BVDV, Influenza-/Grippe-Viren (begrenzt viruzid)
- wirksam gegen Rota- und Noro-Viren

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten als wirksamen Bestandteil: 45,0 g Ethanol

### Lieferformen

| Einzelpackung                                   | VE                 | Art.-Nr.         |
|---|--------------------|------------------|
| 1 Packung<br>à 80 Tücher<br>Tuchgröße: 20x22 cm | 12 x 1<br>Flowpack | 00-323DS-T080-01 |

### Besondere Hinweise

Entzündbarer Feststoff. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

### Gutachten

**Prof. Dr. Schubert**, Hygieniker, Frankfurt: Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH Richtlinien

**Dr. Suchomel**, Hygienikerin, Wien: Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH Richtlinien

**Dr. Steinmann**, Virologe, Bremen: Gutachten zur Vaccinia-Wirksamkeit  
Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit

**Prof. Dr. Werner**, Hygieniker, Schwerin: Gutachten zur MNV-Wirksamkeit  
Gutachten zur Rota-Virus-Wirksamkeit  
Gutachten zur mykobakteriziden und tuberkuloziden Wirksamkeit gem. EN 14348

### Umweltinformation

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umwelt-schonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.

### Produktstatus/Listungen

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der ÖGHMP.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES sind registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N-61472

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.



Die Dr. Schumacher GmbH ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.

Wir sind Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.