

# TECHNISCHE INFORMATION

**KLEEN  
PURGATIS**

## FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL

### BUDESIN U VAH-gelistet (DGHM)



Art.-Nr. 142.512 10-l-Kanister

- Flächendesinfektionsmittel für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände wie im Krankenhaus, in der allg. Praxis, Schwimmbädern, Solarien und Saunen
- besonders wirtschaftlich
- verfügt über ein breites mikrobizides Wirkungsspektrum
- wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen, Pilze und Viren einschl. HBV- und HIV-Viren

#### ANWENDUNGSBEREICH:

Zur Desinfektion aller Flächen, Einrichtungen und Gegenständen im Krankenhaus und in der allgemeinen Praxis, Schwimmbädern, Solarien, Saunen.

#### DOSIERUNG UND KONTAKTZEITEN:

Bakterizide/ Levurozidie	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]	Dosierung [ml/l Wasser]		
				1l	8l	10l
VAH	gering	7,5	5	75	600	750
		2,0	15	20	160	200
		1,0	60	10	80	100

Viren (RKI/ DVV Richtlinien)	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]
Hepatitis-B Virus	gering	1,5	30
		5,0	1
	hoch	3,0	30
		1,5	60
Rota Virus	gering	0,25	1
Vaccinia Virus	gering	1,0	15
		3,0	15
	hoch	7,5	1
BVDV	hoch	0,5	15
		7,5	1

Viren (EN 14476)	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]
Norovirus EN 14476	gering	6,0	30
Influenza A (H1N1) Virus EN 14476	hoch	3,0	15

#### KLEEN PURGATIS GmbH

##### Zentrale

Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen  
Fon +49 (0) 5223 9970-40  
Fax +49 (0) 5223 9970-195  
info@kleen-purgatis.de

##### Vertrieb International

Firststrasse 15  
CH-8835 Feusisberg  
Fon +41 (0) 44 515 35 61  
Fax +41 (0) 44 515 35 69  
info@kleen-purgatis.ch

[www.kleen-purgatis.de](http://www.kleen-purgatis.de)

Ein Unternehmen der  
**BUDICH GRUPPE**

Wirksamkeit	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]
Rohes Holz kontaminiert mit Pilzen		2,0 1,5	60 240
Acrylglas u.ä. Flächen		7,5 5,0	1 5
Bakterizid EN 1040 P. aeruginosa, S. aureus		0,05	5
Bakterizid EN 1276 P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, E. hirae	gering	1,0	5
Bakterizid EN 1276 Salmonella cholerasuis, Listeria monocytogenes	hoch	0,5	5
Fungizid EN 1650 C. albicans	gering	0,2	5
Fungizid 13624 C. albicans	gering	0,2	5
Bakterizid EN 13727 P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae	gering	1,0	5
Bakterizid EN 14561 P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae	gering	2,0	15
Fungizid EN 14562 C. albicans	gering	1,5	15
Bakterizid EN 13697 P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, E. hirae		2,0	5
Levurozidie EN 13697 C. albicans		1,5	15

**Anwendungshinweise:** Nur in den vorgeschriebenen Konzentrationen und Zeiten anwenden. Flächen gut mit Wasser nachspülen. Hautkontakt mit dem Konzentrat vermeiden. Sicherheitshinweise beachten. **Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.**

**TECHNISCHE DATEN:**

Aussehen: ..... farblose Flüssigkeit  
Geruch: ..... produktspezifisch  
Viskosität: ..... dünnflüssig  
Dichte: ..... 985 g/l  
pH-Wert im Konzentrat: ..... 8

**INHALTSSTOFFE:**

5-15 %: ..... kationische Tenside  
Weitere Angaben: ..... in 100 g Budesin U sind 3,35 % Didecyldimethylammoniumchlorid, 3,35 % Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid und 3,35 % Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid als Desinfektionswirkstoffe enthalten  
Giscode: ..... GD 40  
Zulassungs-Nummer: ..... N-11974 · zugelassen als Desinfektionsmittel für den Privatbereich  
Haltbarkeit: ..... im Originalgebinde mind. 3 Jahre, vor Hitze schützen

**KENNZEICHNUNG:**



**Enthält: Didecyldimethylammoniumchlorid, Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid**  
**Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**Gefahr**

**TRANSPORT:**

UN-Nummer: 1903 / Bezeichnung: Desinfektionsmittel, flüssig, ätzend, n.a.g. / Klasse: 8 / Verpackungsgruppe: III / ADR

**KLEEN PURGATIS GmbH**

**Zentrale**  
Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen  
Fon +49 (0) 5223 9970-40  
Fax +49 (0) 5223 9970-195  
info@kleen-purgatis.de

**Vertrieb International**  
Firststrasse 15  
CH-8835 Feusisberg  
Fon +41 (0) 44 515 35 61  
Fax +41 (0) 44 515 35 69  
info@kleen-purgatis.ch

[www.kleen-purgatis.de](http://www.kleen-purgatis.de)

**Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE**